





The Power of Mobility

UN CO-PILOTE QUASIMENT INVISIBLE



Pour les accompagnateurs de fauteuils roulants, il est important que le fauteuil roulant soit aisé à déplacer lors de son utilisation. Le nouveau Co-pilot de Permobil pour fauteuils roulants commandés par les accompagnateurs fonctionne différemment des versions précédentes. L'avantage principal du Co-pilot réside dans une commande très intuitive qui ne fait quasiment pas appel à la force musculaire, elle est tout aussi aisée que la manipulation d'une poussette. Le système de commande réagit instantanément aux modifications de vitesse ou de direction. Le Co-pilot possède une fonction unique qui permet à l'accompagnateur de régler les fonctions du fauteuil et la vitesse.

Saisissez doucement la barre de commande et le fauteuil se déplace dans la direction souhaitée. Appuyez légèrement sur la droite et le fauteuil se déplace sans grande difficulté vers la droite. Si vous marchez plus rapidement, le fauteuil augmente également sa vitesse. Grâce au réglage proportionnel, la conduite est plus simple et plus sûre, tant pour l'accompagnateur que pour l'utilisateur du fauteuil.

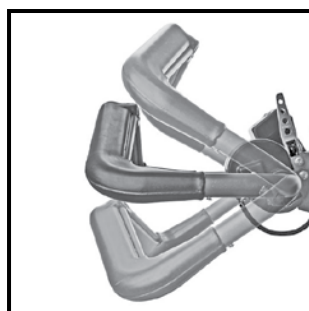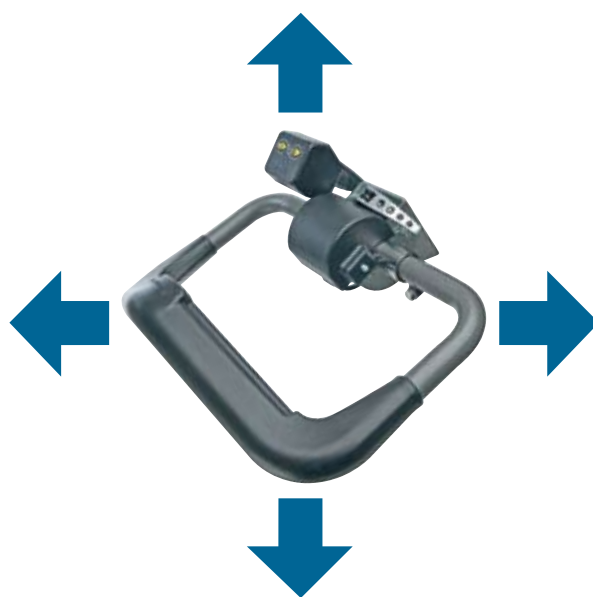

La poignée, de conception ergonomique, peut être rabattue si elle n'est pas utilisée.



La hauteur et l'inclinaison de la poignée sont réglables pour une facilité d'utilisation améliorée pour l'accompagnateur.

Pour davantage d'informations et pour connaître les prix, veuillez prendre contact avec le représentant commercial de Permobil. Téléphonnez au +33 (0)437 26 27 28 ou surfez sur notre site www.permobil.com

COPILLOT122009FR